


ЦИФРОВОЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ИМПЛАНТАТА IU

Хирургический протокол IU с применением направляющих шаблонов


- Два типа металлических втулок, соответствующих диаметру направляющего отверстия
 - Стандартная F 3.6/F4.0/F 5.0
 - Широкая F5.5/F 6.0
- Выберите длину фрез в соответствии со смещением

		Длина имплантата (мм)				
		7.5	8.5	10	11.5	13
Смещение (мм)		↓	↓	↓	↓	↓
10		Используйте фрезу той же длины, что и имплантат.				
		8.5		10	11.5	13
11.5		Используйте фрезу на 1.5 мм длиннее, чем длина имплантата				
		10		11.5	13	14.5
13		Используйте фрезу на 3 мм длиннее, чем длина имплантата				
		11.5		13	14.5	14.5 Просверлите до 16

- Имплантат L7.5 мм имеет смещение 10/11.5/13 мм, что отличает его от имплантатов других значений длины. Хирургический протокол как для имплантата F8.5.

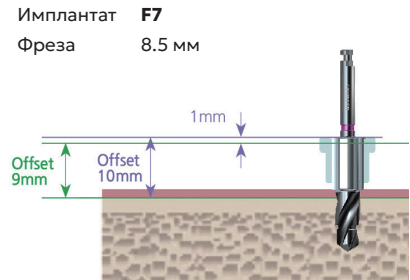


- Фреза 14.5 мм не имеет стоппера и может погружаться до 16 мм, расстояние между метками соответствует 1.5 мм

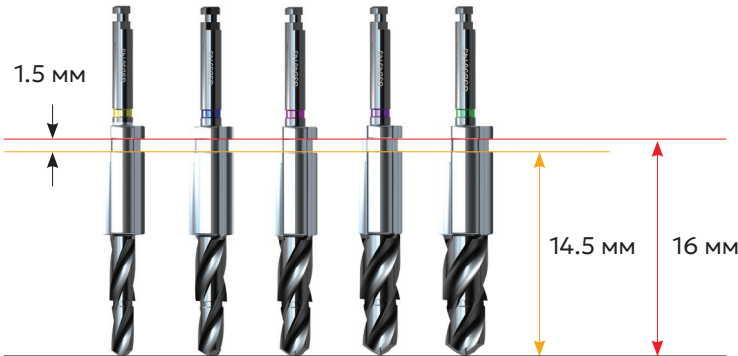


- Фрезы, входящие в набор WAGA, имеют стандартную длину смещения 9 мм. Поэтому используйте фрезу выборочно в соответствии с приведенными ниже направляющими шаблонами и смещениями.
- Направляющий шаблон Warantec может выборочно использоваться с втулкой и без втулки.


Смещение 9 мм

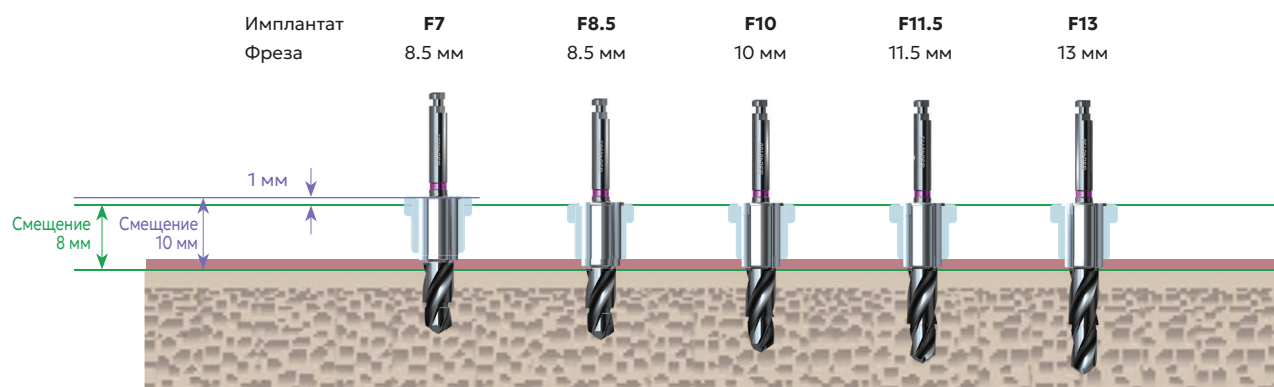


Смещение 10.5 мм

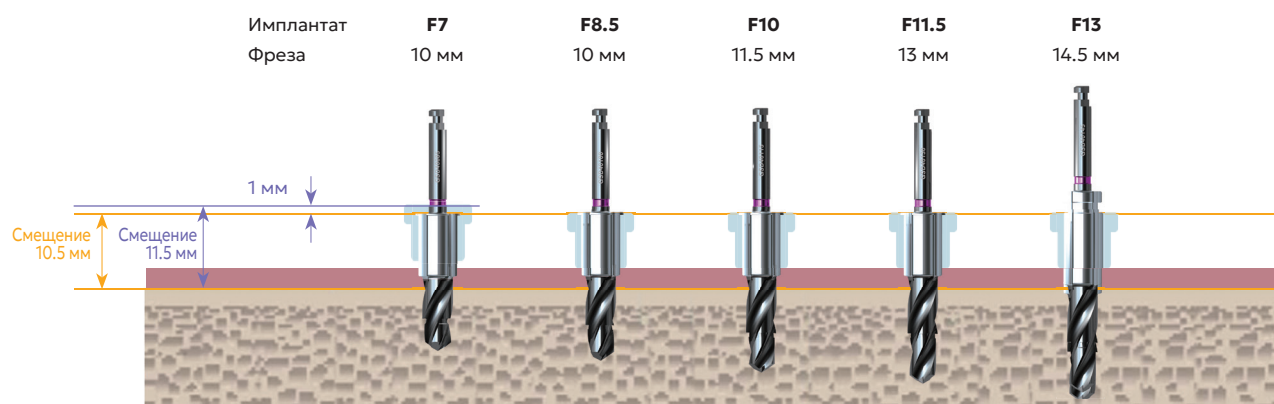


Смещение 12 мм

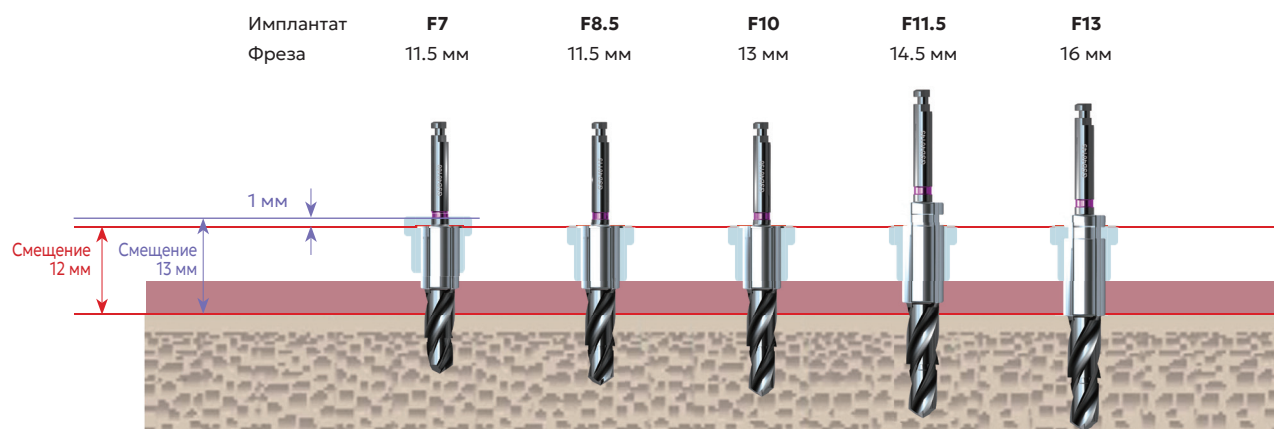


Цифровой протокол IU F3.6X10mm

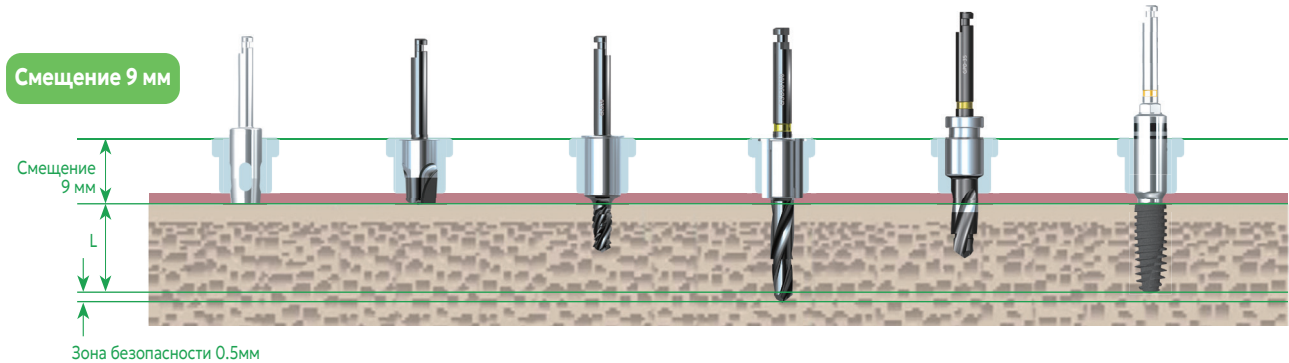

Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 10мм	Финальная F3.6	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶		

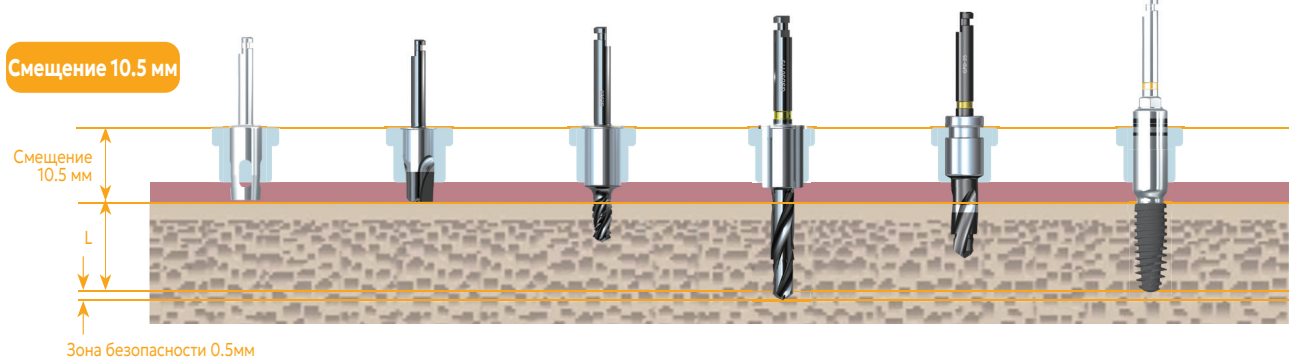


Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 11.5мм	Финальная F3.6	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶		

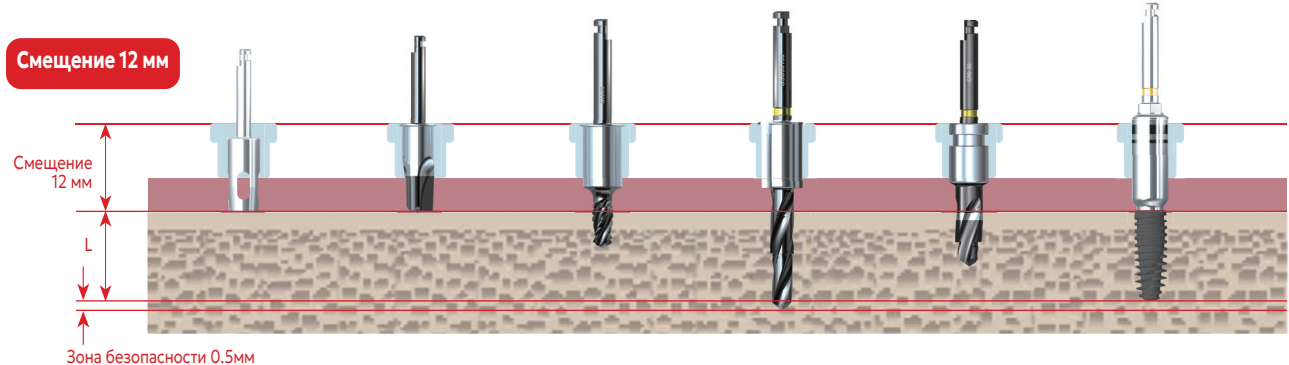


Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 13мм	Финальная F3.6	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶		


Цифровой протокол IU F4.0X10mm

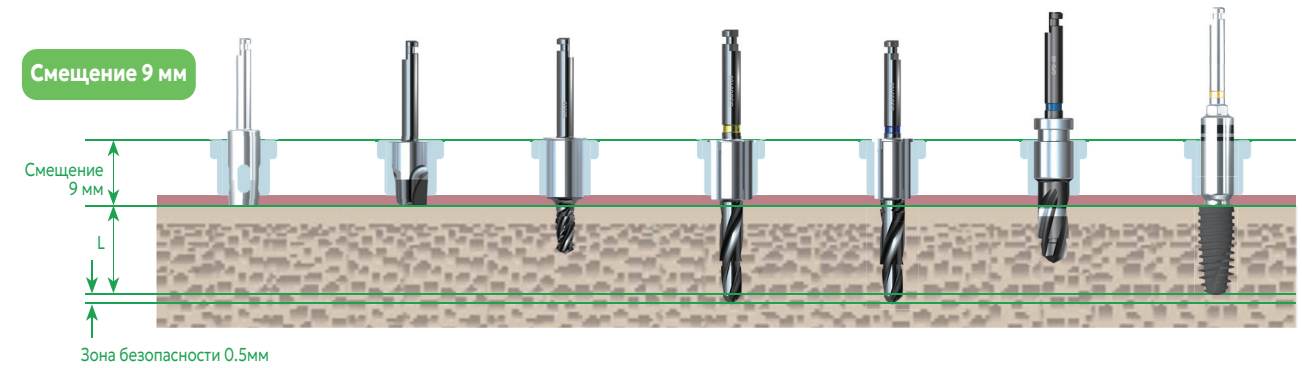

Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 10мм	F4.0 10мм	Финальная F4.0	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶			

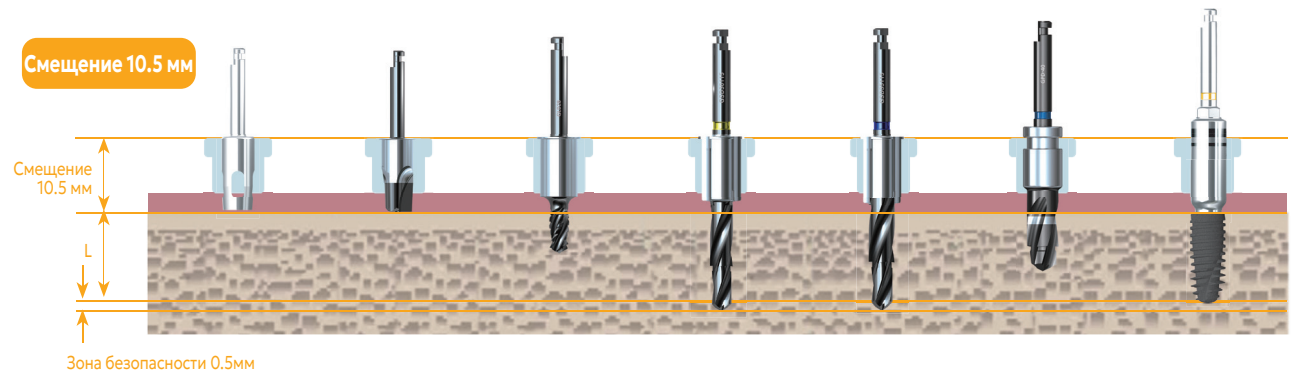


Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 11.5мм	F4.0 11.5мм	Финальная F4.0	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶			

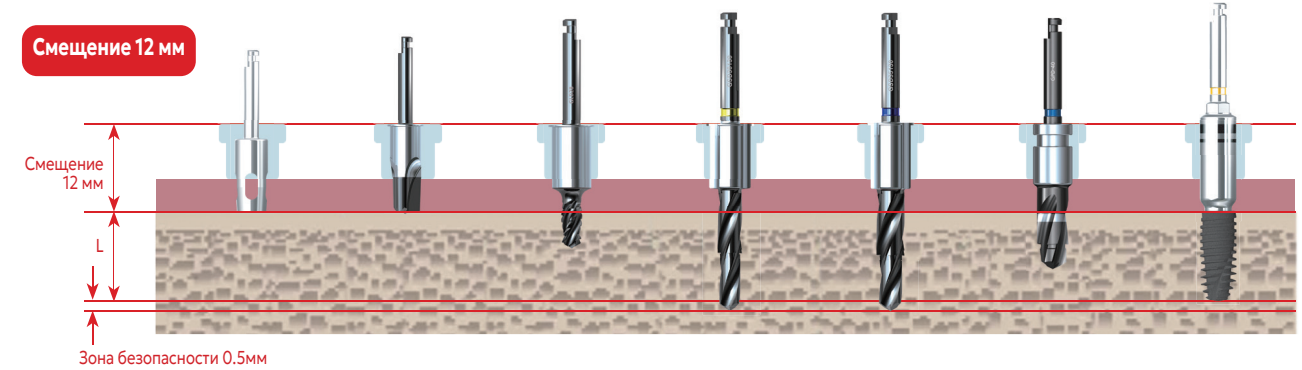


Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 13мм	F4.0 13мм	Финальная F4.0	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶			


Цифровой протокол IU F4.5X10mm

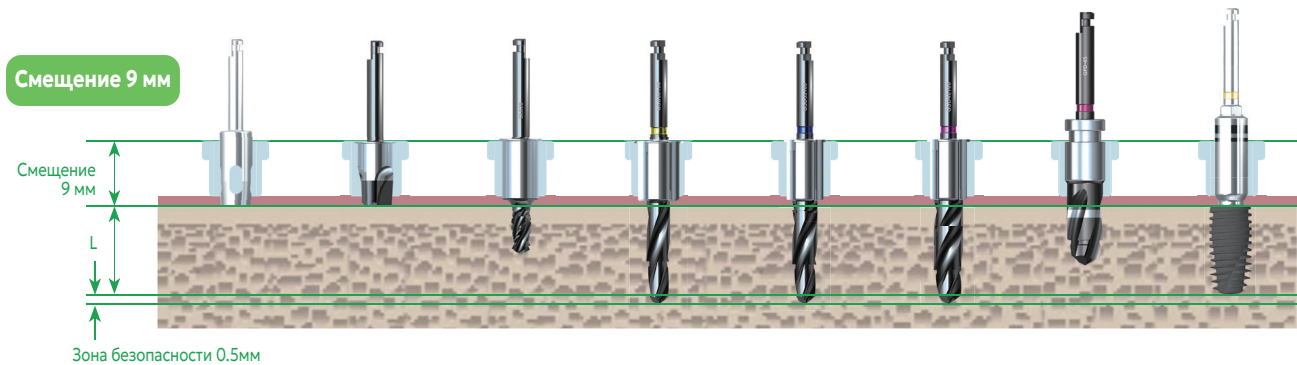

Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 10мм	F4.0 10мм	F4.5 10мм	Финальная F4.5	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶	▶			

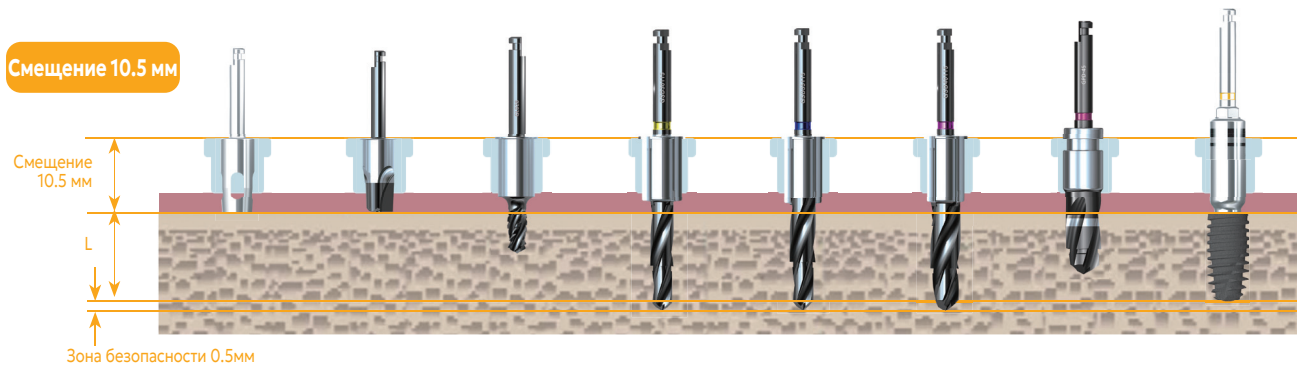


Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 11.5мм	F4.0 11.5мм	F4.5 11.5мм	Финальная F4.5	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶	▶			

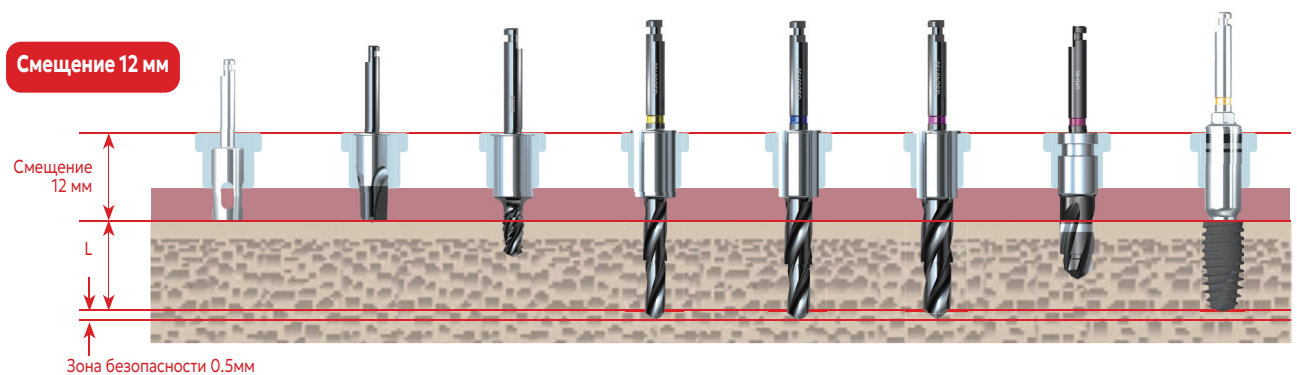

Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 13мм	F4.0 13мм	F4.5 13мм	Финальная F4.5	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶	▶			


Цифровой протокол IU F5.0X10mm

Смещение 9 мм

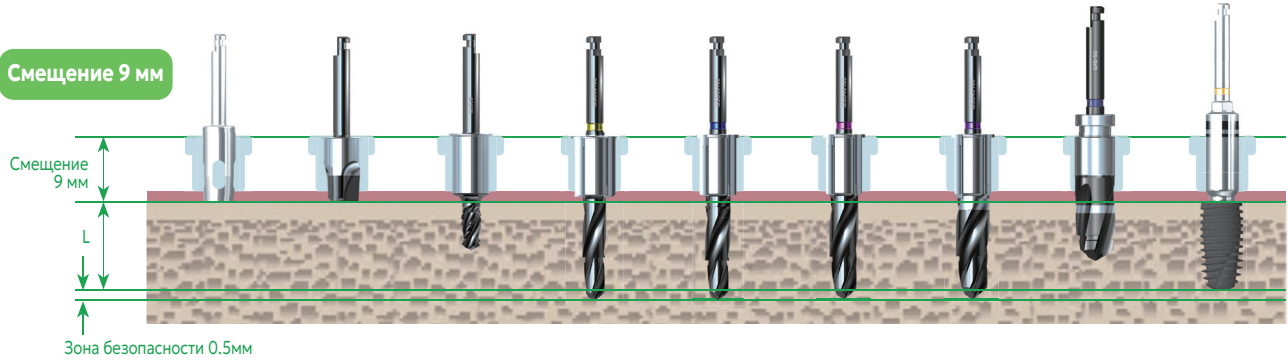


Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 10мм	F4.0 10мм	F4.5 10мм	F5.0 10мм	Финальная F5.0	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶	▶	▶			

Смещение 10.5 мм

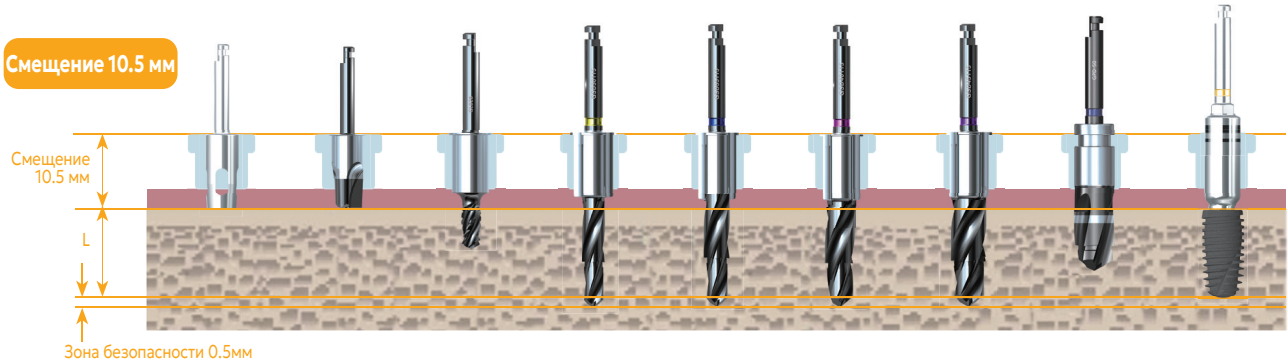

Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 11.5мм	F4.0 11.5мм	F4.5 11.5мм	F5.0 11.5мм	Финальная F5.0	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶	▶	▶			

Смещение 12 мм

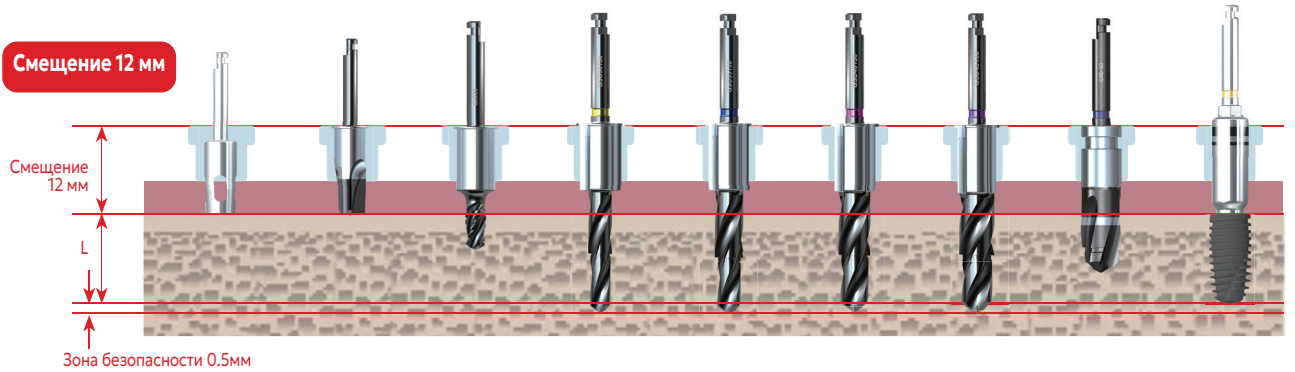

Тип кости	Мукотом	Торцевая	Начальная	F3.6 13мм	F4.0 13мм	F4.5 13мм	F5.0 13мм	Финальная F4.5	Имплантовод
Плотная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	Установка имплантата
Нормальная	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
Мягкая	▶	▶	▶	▶	▶	▶			