

WARANTEC

Powered by Aidite



TrueFit Pro5

Сканбоди при полной адентии

Aidite

Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.
Тел.: +86-400-003-1233
Сайт: www.aidite.com
Email: info@aidite.com
VI-260210



Warantec



www.aidite.com



Facebook

Здоровая и красивая улыбка — каждому



TrueFit Pro5

Более точная и эффективная
система реставраций при полной адентии

Преимущества продукта




Малая область сканирования

Верхняя пятигранная поверхность плоско-выпуклая, с чёткими маркерами для лёгкого распознавания



Низкая погрешность

Цельная технология изготовления: погрешность сопоставления с базой данных менее 0,005 мм

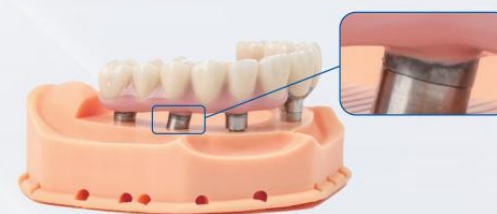

Точная посадка реставрации

Погрешность соединения (RMS) около 0,02 мм обеспечивает пассивную посадку реставрации на абатмент



Совместимость с любым интраоральным сканером

Пескоструйная обработка поверхности улучшает качество изображения и плавность сканирования



Совместимость с ведущими системами имплантатов

Заменяется только позиционирующий винт — меньше вложений



Полная линейка типоразмеров и моделей

Четыре длины (S/M/L/X) и коннекторы — для любых расстояний между имплантатами

Порядок применения

Подготовка к сканированию

■ Очистка перед сканированием

Перед интраоральным сканированием полностью удалите слюну и следы крови. Держите область сканирования сухой, чтобы избежать пропусков изображения и пузырей из-за бликов жидкости в свете сканера

■ Настройка источника света

Во время сканирования отводите светильник стоматологической установки: его свет создаёт помехи и искажения изображения


■ Подготовка сканбоди

Уточните модель сканбоди: тип соединения, трансгингивальная высота, материал, маркерная зона и т. д.

■ Комфорт и коммуникация

Помогите пациенту расслабиться и напомните дышать через нос: при дыхании ртом линза сканера запотевает, что снижает точность изображения

Как разместить сканбоди?

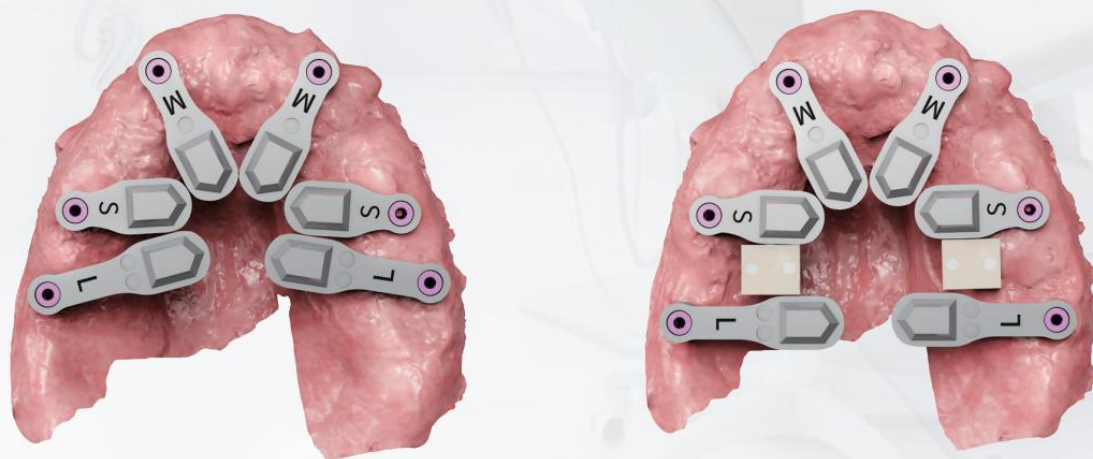

Устанавливайте сканбоди по направлению к центру зубной дуги, сводя их передние концы вместе



Если соседние имплантаты расположены далеко друг от друга, соедините два сканбоди коннектором

Этапы сканирования



Шаг 1:

Установите скан-колпачки и получите STL-данные десны при интраоральном сканировании

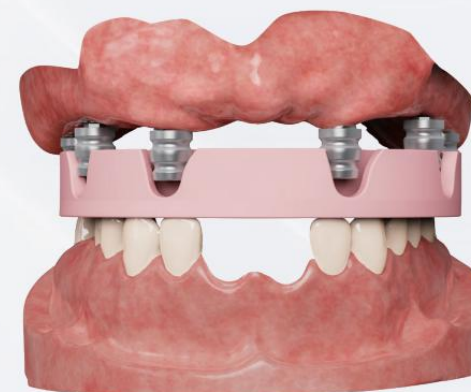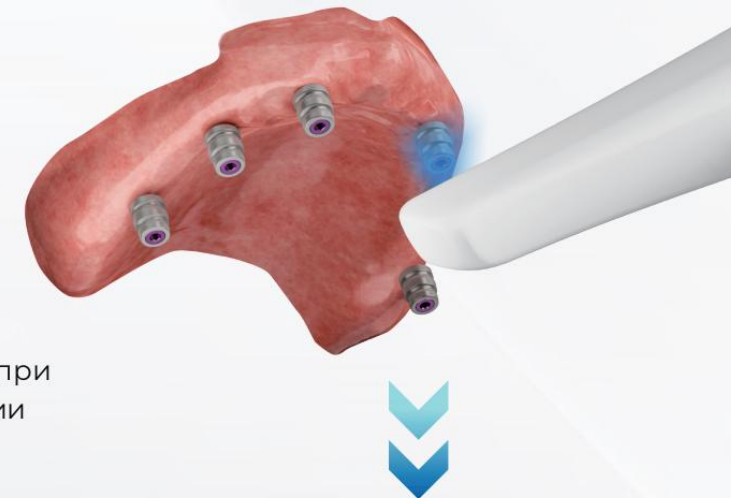

Шаг 2:

Проверьте окклюзионные соотношения и получите данные окклюзии при сканировании



Шаг 3:

Установите сканбоди и получите их STL-данные




Характеристики сканбоди

Комплектация набора TrueFit Pro5


Состав набора GH6.6		
Название	Артикул	Количество
Скан-колпачок	04TF55648G	12
Сканбоди GH6.6, тип S	04TF56648S	3
Сканбоди GH6.6, тип M	04TF56648M	3
Сканбоди GH6.6, тип L	04TF56648L	3
Сканбоди GH6.6, тип X	04TF56648X	2
Винт сканбоди M1.4	04TF5M14	11
Винт сканбоди M1.8	04TF5M18	11
Винт сканбоди M2.0	04TF5M20	11
Винт скан-колпачка M1.4	04TF5M14G	12
Винт скан-колпачка M1.8	04TF5M18G	12
Винт скан-колпачка M2.0	04TF5M20G	12
Отвёртка	HDI210S	1
Коннектор	TPCT	2

Определение длины и трансгингивальной высоты


Отличительные признаки			
Тип	Модель	Маркировка	Длина
Короткий	S	Нет	16,3 мм
Средний	M	1 кольцо	19,3 мм
Длинный	L	2 кольца	22,3 мм
Сверхдлинный	X	3 кольца	25,0 мм

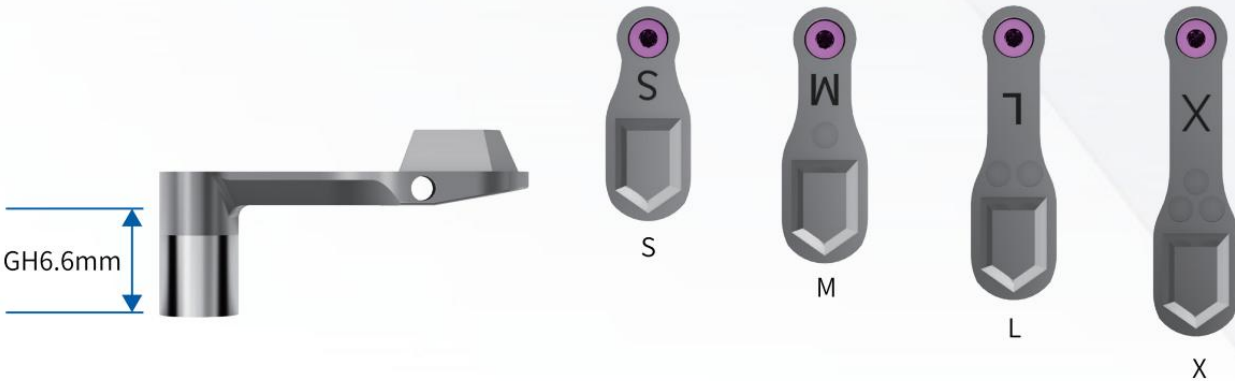

Скан-колпачок

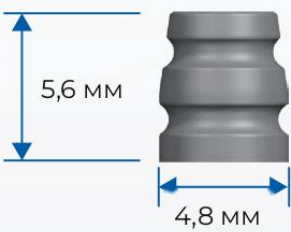

Коннектор

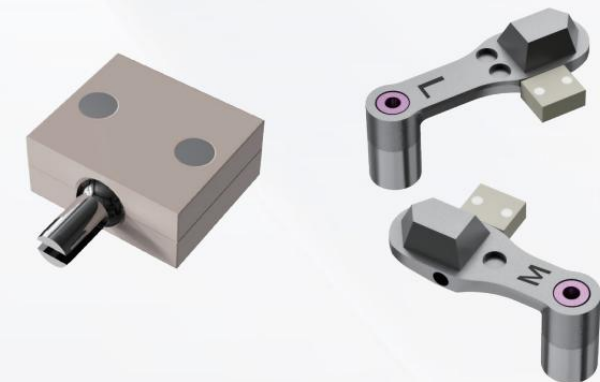

Совместимые системы имплантатов

*Центральные винты разных серий имеют цветовую маркировку для идентификации — это исключает путаницу при подборе

	M1.4 X 0.3P	
	M1.4 X 0.25P	
	M1.6 X 0.2P	
	M1.8 X 0.35P	
	M2.0 X 0.4P	