

Профилировщик кости

- Фреза для удаления нависающих краев кости после установки имплантата, чтобы предотвратить соприкосновение между костью и абатментом.
- Прикрепите направляющий винт к имплантату, это позволит легко удалить окружающую кость, не повредив имплантат
- Выберите фрезу для использования, учитывая размер имплантата и абатмента
- Рекомендованная скорость вращения: 800-1.000 об/мин.

Арт. №	Диаметр (мм)
BP-45	4.5
BP-55	5.5
BP-75	7.5

