

IU Full Kit



ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ ИМПЛАНТАТА IU



Для сверления всегда рекомендуется использовать стоппер на 1 шаг короче, чем длина устанавливаемого имплантата, чтобы убедиться, что имплантат будет погружен на 0,5~1,0 мм глубже уровня кости.

Полный набор для имплантата IU (F3,6-F6,0)


Арт №: IU KIT

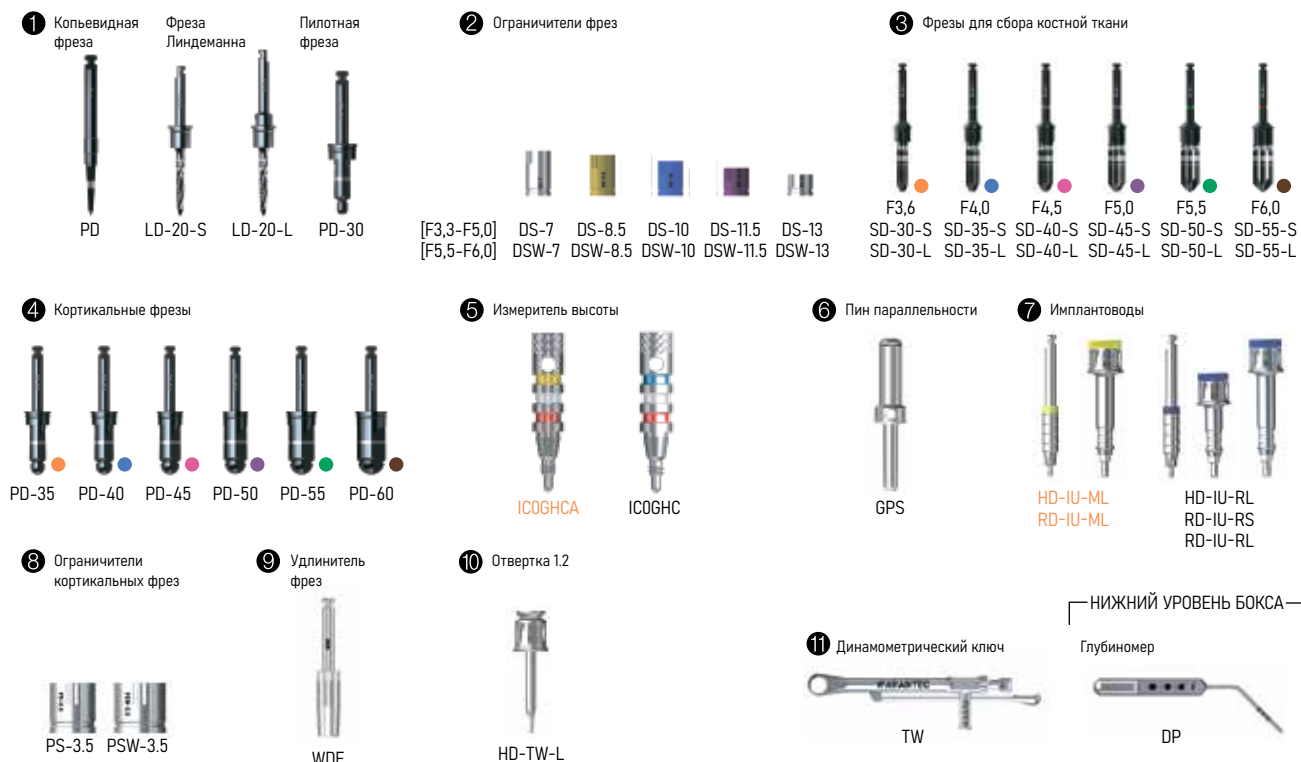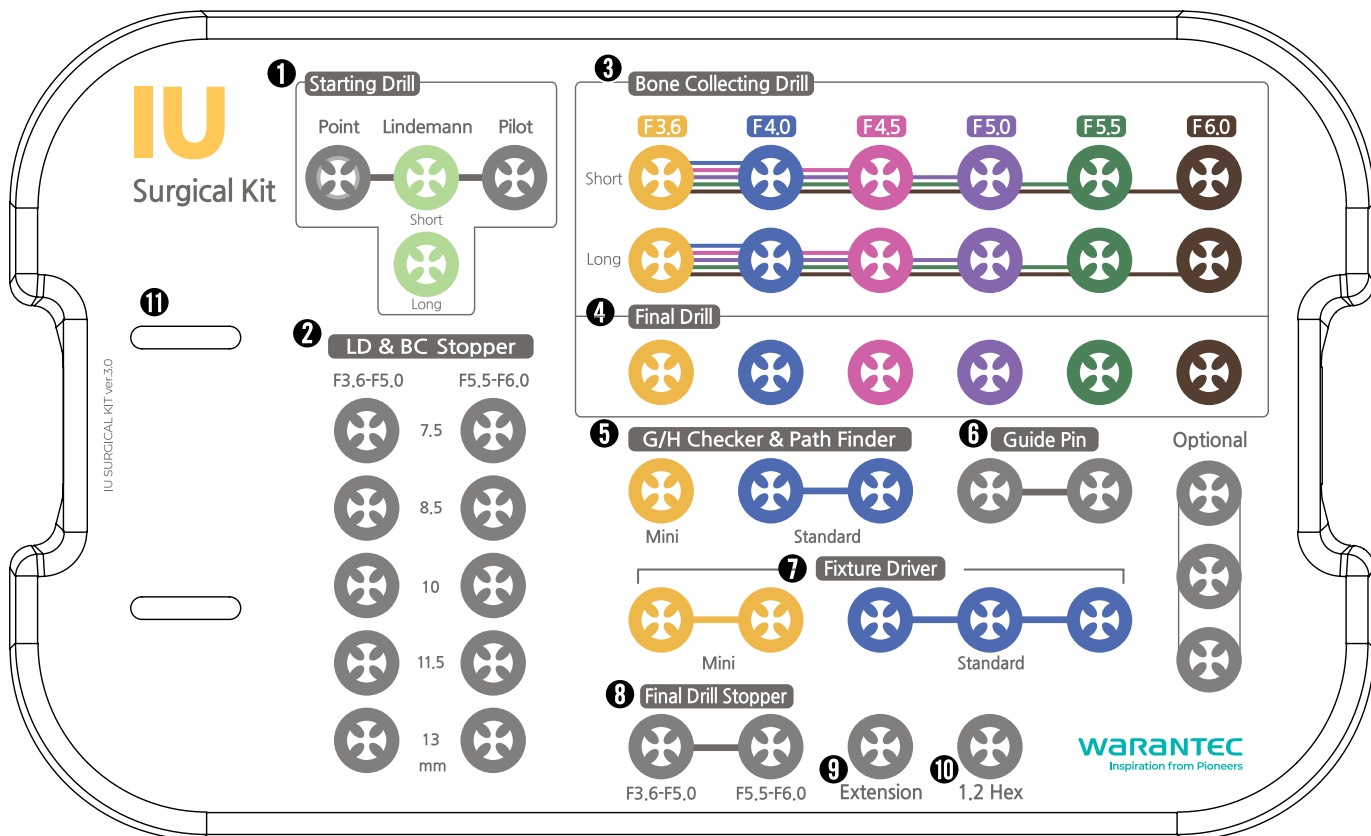

Копьевидная фреза (начальная)

- Начальное сверло для легкого размещения точки имплантации на твердой кортикальной кости без соскальзывания на этапе создания отверстия для имплантации


Арт. №	Диаметр	Рабочая часть (EL)
PD	1.5	9.5

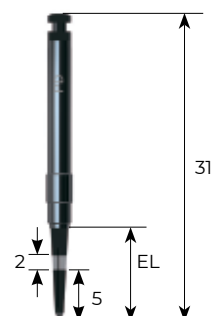

Фреза Линдемманна

- Для первоначального формирования ложа под имплантат с учетом глубины погружения и наклона имплантата.
- Необходимо просверлить отверстие на глубину, равную длине имплантата
- Для удобства пользователя предусмотрены короткое и длинное сверло
- Во время сверления возможна коррекция угла

Арт. №	Длина (мм)	Тип
LD-20-S	30	Короткое
LD-20-L	33	Длинное

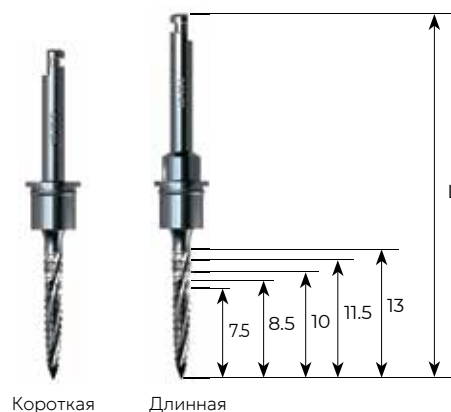

Пилотная фреза

- Сохранение траектории предыдущего сверла при использовании следующего сверла
- Для расширения диаметра верхней части отверстия малого диаметра нижняя часть сверла имеет направляющую, а верхняя часть сверла имеет торцевое лезвие, которое шире направляющей

Арт. №
PD-30



Фреза для сбора костной ткани

- Может одновременно сверлить и собирать достаточное количество костной ткани
- Минимальный нагрев при сверлении
- Глубину сверления можно легко отрегулировать с помощью стоппера
- Для удобства пользователей предусмотрены короткие и длинные сверла

Имплантат	F3.6	F4.0	F4.5	F5.0	F5.5	F6.0
Короткий	SD-30-S	SD-35-S	SD-40-S	SD-45-S	SD-50-S	SD-55-S
Длинный	SD-30-L	SD-35-L	SD-40-L	SD-45-L	SD-50-L	SD-55-L
Диаметр	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5



Кортикальная фреза

- Фреза для расширения кортикальной кости после использования фрезы для сбора костной ткани
- Используется для финализации ложа под имплантат в твердой кости
- Для каждого диаметра имплантата




Имплантат	F3.6	F4.0	F4.5	F5.0	F5.5	F6.0
Арт. №	PD-35	PD-40	PD-45	PD-50	PD-55	PD60
Диаметр	Ø3.6	Ø4.1	Ø4.6	Ø5.1	Ø5.6	Ø6.1

Пин параллельности

- Используется для определения направления и расположения места препарирования кости после использования фрезы Линдемманна

Арт. N°

GPS

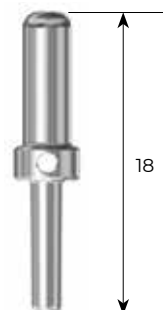

Удлиннитель фрезы

- Инструмент для увеличения длины фрез и машинных имплантопроводов
- Неполная сборка может привести к изгибу или поломке удлинителя
- Длина может быть увеличена на 15,4 мм при установке удлинителя фрезы

Арт. N°

WDE

Длина

15.4



Измеритель высоты

- Сверьте высоту десны с указанной цветной линией
- В многокомпонентном случае собирать с имплантатом, установленным первым, чтобы подтвердить точную траекторию имплантации

Арт. N°


ICOGHCA

ICOGHC

Тип

Мини

Стандартный

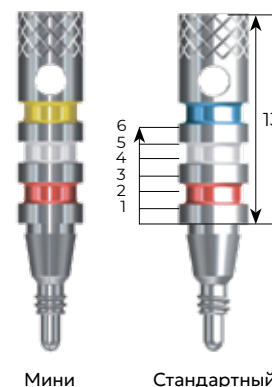

Мини

Стандартный

Ограничитель фрезы

- Длина ограничителя фрезы указывает на фактическую длину фрезы, оставшуюся после присоединения ограничителя
- Цветовая маркировка нанесена по всей длине, чтобы было удобно определить длину и поместить ее в набор



Арт. №								Имплантат
DS-5	DS-5.5	DS-6	DS-7	DS-8.5	DS-10	DS-11.5	DS-13	F3.3-F5.0
DSW-5	DSW-5.5	–	DSW-7	DSW-8.5	DSW-10	DSW-11.5	DSW-13	F5.5-F6.0

Опционально

- Стоппер останавливает фактическую длину, исключая длину зоны безопасности
- **Для сверления всегда рекомендуется использовать стоппер на 1 шаг короче, чем длина устанавливаемого имплантата, чтобы убедиться, что имплантат будет погружен на 0,5~1,0 мм глубже уровня кости**

Ограничитель кортикальной фрезы

- Длина ограничителя фрезы указывает на глубину верхней части кости, которая удаляется, когда ограничитель сверла прикреплен к кортикальной фрезе



Арт. №	Имплантат
PS-3.5	F3.3-F5.0
PSW-3.5	F5.5-F6.0

Имплантовод машинного типа

- Используется при установке имплантата с помощью машинного оборудования
- Соединение: F3,3-F3,6 (мини-желтый), F4,0-6,0 (стандартный-синий)
- Для удобства пользователя предусмотрены короткие и длинные имплантоводы

Арт. №	Длина (мм)	Тип	
HD-IU-MS	25	Мини	*Опционально
HD-IU-ML	29		
HD-IU-RS	25	Стандартный	*Опционально
HD-IU-RL	29		



Имплантовод для динамометрического ключа

- Используется при установке имплантата с помощью динамометрического ключа
- Соединение: F3,3-F3,6 (мини-желтый), F4,0-6,0 (стандартный-синий)
- Перед использованием необходимо убедиться, что инструмент полностью собран. Неполная сборка может привести к разрушению из-за сильного напряжения
- Будьте осторожны, так как чрезмерный крутящий момент может привести к повреждению внутреннего шестигранника
- Для удобства пользователя предусмотрены короткие и длинные имплантоводы

Арт. №	Длина (мм)	Тип	
RD-IU-MS	13.2	Мини	*Опционально
RD-IU-ML	18.8		
RD-IU-RS	13.2	Стандартный	*Опционально
RD-IU-RL	18.8		




Глубиномер

- Измеряет глубину сверления (7 ~ 13 мм)

Арт. N°

DP

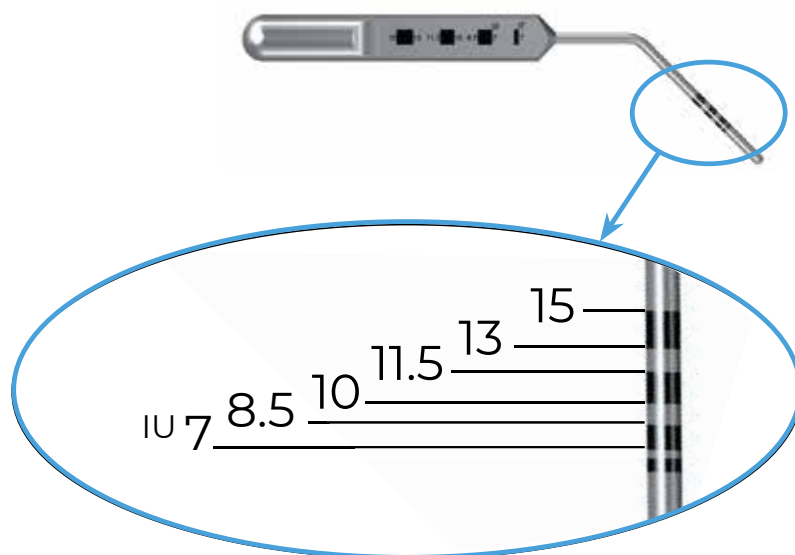


Динамометрический ключ

- Прикрепите его к адаптеру или имплантоводу для придания крутящего момента (торка) во время имплантации или крепления винта
- Придает крутящий момент (торк), потянув за стержень до указанной линии значения крутящего момента, который пользователь хочет приложить
- Не отсоединяя коннектор, просто поверните рукоятку динамометрического ключа, чтобы изменить направление крутящего момента

Арт. N°

DP

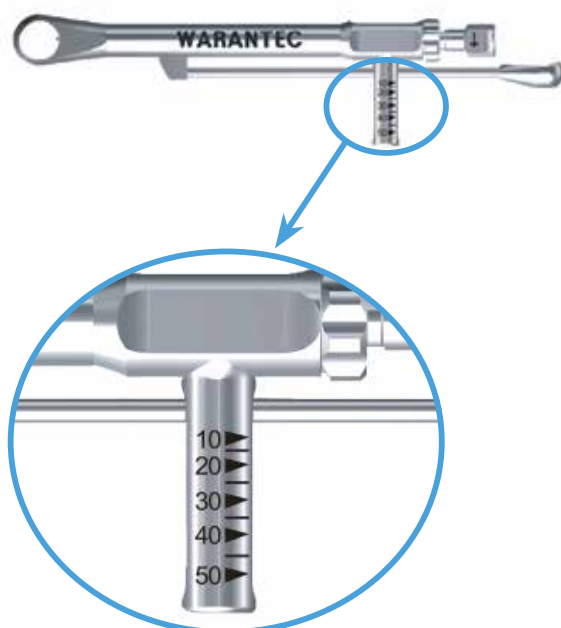


Шестигранная отвёртка 1.2 машинного типа

*Опционально

- Машинная шестигранная отвёртка
- Используется для всех винтов-заглушек, винтов абатмента и формователей десен
- Шестигранный наконечник разработан таким образом, чтобы быть стабильным даже при крутящем моменте 35 ~ 45 Нсм, если крутящий момент превышает этот предел, наконечник может быть поврежден
- Имеет различную длину для удобства пользователей

Арт. N°	Длина (мм)
HD-LT-S	20
HD-LT-L	24
HD-LT-LL	28

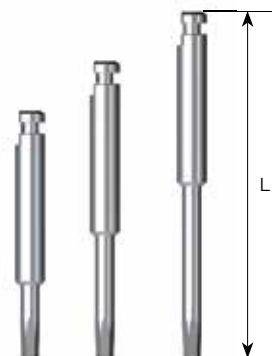

Короткая Длинная Сверхдлинная

Ручная отвёртка 1.2 для динамометрического ключа

- Можно использовать с динамометрическим ключом и как ручную отвертку
- Используйте его для всех винтов-заглушек, винтов абатмента и формователей десен
- Шестигранный наконечник разработан таким образом, чтобы быть стабильным даже при крутящем моменте 35 ~ 45 Нсм, если крутящий момент превышает этот предел, наконечник может быть поврежден
- Имеет различную длину для удобства пользователей



Короткая Длинная Сверхдлинная

Арт. N°	Длина (мм)	
HD-TW-S	8	*Опционально
HD-TW-L	13	
HD-TW-LL	18	*Опционально

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Узкая фреза Линдемманна

*Опционально

- Фреза Линдеммана, предназначенная для **IU F3.3**
- Сделайте отверстие, чтобы определить глубину и ось имплантации
- Необходимо просверлить отверстие на глубину, равную длине имплантата
- Во время сверления возможна коррекция угла

Арт. №

NLD-20

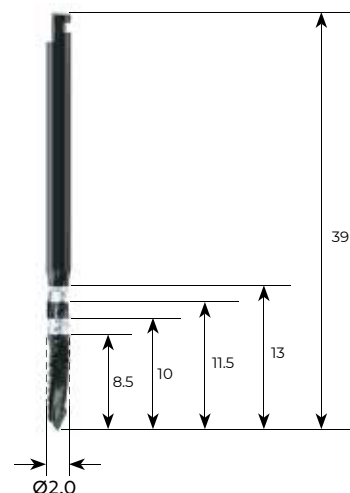


Узкая прямая фреза

*Опционально

- Прямая фреза, предназначенная для **IU F3.3**
- Необходимо просверлить отверстие на глубину, равную длине имплантата
- Цветовая маркировка на верхней части фрезы указывает на диаметр и основной используемый имплантат

Арт. №

NSD-27

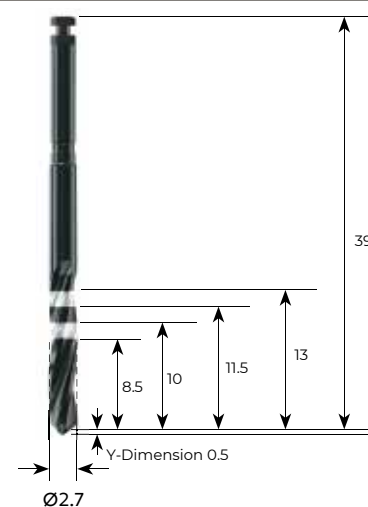

Узкая финальная фреза

*Опционально

- Фреза конечного диаметра, предназначенная для **IU F3.3**
- Фреза для расширения кортикальной кости
- Используйте ее после того, как сделаете конечные отверстия на твердых костях

Арт. №

NPD-33

